



Serono GmbH
Ein Unternehmen von Merck
Alsfelder Str. 17
D-64289 Darmstadt
Tel.: 0 61 51-62 85-0
Fax: 0 61 51-62 85-821
www.merckserono.net

Merck Serono Communication Center
Gebührenfreie Telefon-Hotline
0 800/100 51 77
www.einfach-wachsen.de

E-B66SAI0509



Menüführung easypod™ für Patienten



Tägliche Injektion in nur drei Schritten

*Diese Kurzanleitung ist kein Ersatz für die umfassende Bedienungsanleitung.
Bitte lesen Sie die Broschüre mit Benutzerhinweisen, die mit Ihrem Gerät mitgeliefert wurde.*

1. Nadel einsetzen



- 🔪 Sterile Versiegelung entfernen.



- 🔪 Die Nadelkappe in der Vertiefung am easypod™ einrasten lassen.
- 👂 Die Nadel rastet ein & der easypod™ piept zweimal.



- 🔪 Die Nadelkappe wird entfernt, indem man sie zur Seite biegt und dann herauszieht.

2. Injizieren



- 🔪 Setzen Sie den easypod™ auf Ihre Haut auf.
- 👂 Der easypod™ piept einmal.
- 👁 Das grüne Licht im Injektionsknopf leuchtet auf.



- 🔪 Injektionsknopf drücken.
- 👁 Das grüne Licht im Injektionsknopf blinkt.
- 👂 Der easypod™ piept zweimal.
- 👁 Das grüne Licht im Injektionsknopf erlischt.



- 🔪 Die Injektion ist abgeschlossen und Sie können das Gerät entfernen.

3. Nadel herausnehmen



- 👉 Lassen Sie die leere Nadelkappe in der Vertiefung mit der Nadel einrasten.
- 👂 Der easypod™ piept einmal.




- 👉 Drücken Sie die Taste seitlich der Vertiefung mit der Nadel und halten Sie sie gedrückt, bis Sie zwei Pieptöne hören.
- 👂 Der easypod™ piept zweimal.



- 👉 Entfernen Sie die Nadel und Kappe, indem Sie sie wie schon beschrieben nach rechts biegen.
- 👉 Entsorgen Sie Ihre Nadel sicher und legen Sie Ihren easypod™ wieder in den Kühlschrank.

Patronenwechsel

Patrone leer oder abgelaufen

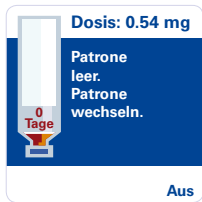

- ⚡ easypod™ zeigt automatisch Patronenwechsel an.
- 👂 Der easypod™ piept zweimal.
- 👁️ Auf dem Bildschirm erscheint „Patronenfach öffnen“.



- ⚡ Öffnen Sie das Patronenfach, indem Sie die blaue Taste an der linken Seite des easypod™ nach oben schieben.




- ⚡ Ersetzen Sie die alte Patrone durch eine neue.




- ⚡ Schließen Sie das Patronenfach.
- 👂 Der easypod™ piept einmal, wenn er betriebsbereit ist.

Manuelles Entfernen der Patrone

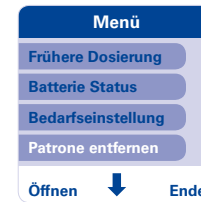

- ⚡ Wählen Sie im Hauptmenü „Patrone entfernen“.

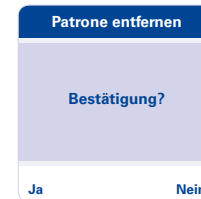

- ⚡ Der easypod™ bittet Sie um Bestätigung Ihrer Wahl.
- 👂 Der easypod™ piept zweimal.
- 👁️ Auf dem Bildschirm erscheint „Patronenfach öffnen“.



- ⚡ Öffnen Sie das Patronenfach, indem Sie die blaue Taste an der linken Seite des easypod™ nach oben schieben.



- ⚡ Ersetzen Sie die alte Patrone durch eine neue.



- ⚡ Schließen Sie das Patronenfach.
- 👂 Der easypod™ piept einmal, wenn er betriebsbereit ist.



Aktualisierung der Einstellungen

*Diese Kurzanleitung ist kein Ersatz für die umfassende Bedienungsanleitung.
Bitte lesen Sie die Broschüre mit Benutzerhinweisen, die mit Ihrem Gerät mitgeliefert wurde.*

Änderung der Nadelgeschwindigkeit



Änderung der Injektionstiefe




Änderung der Injektionsgeschwindigkeit




Änderung der Injektionsdauer




Patrone entfernen

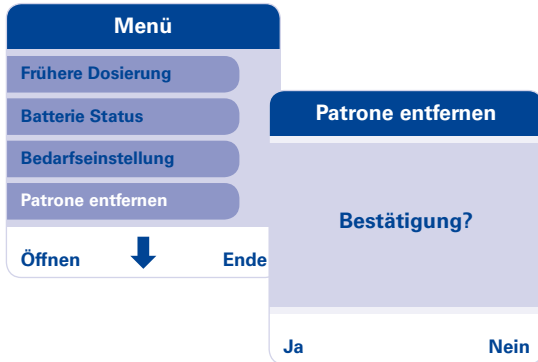


Ton ausschalten

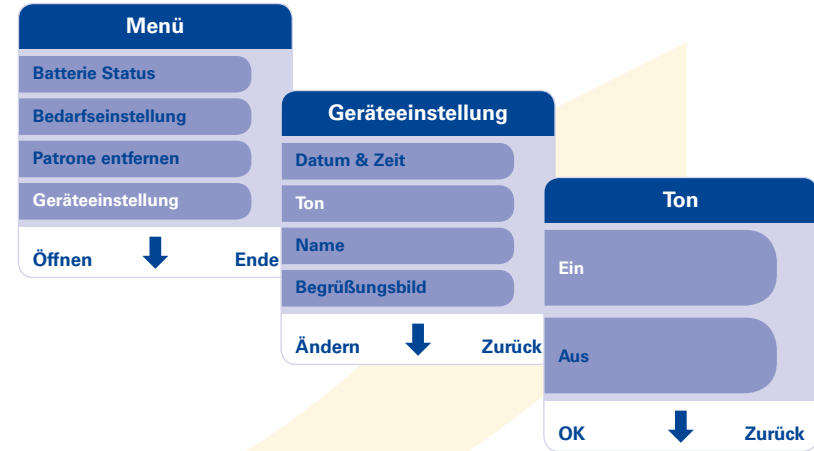


Datum & Uhrzeit

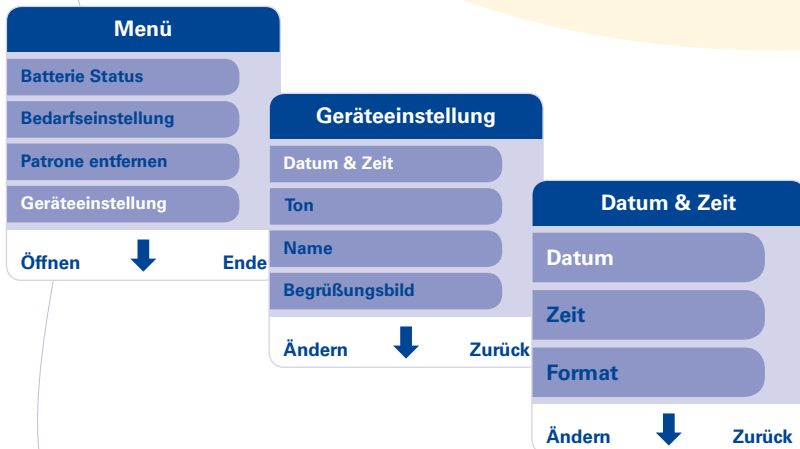


Namenseingabe

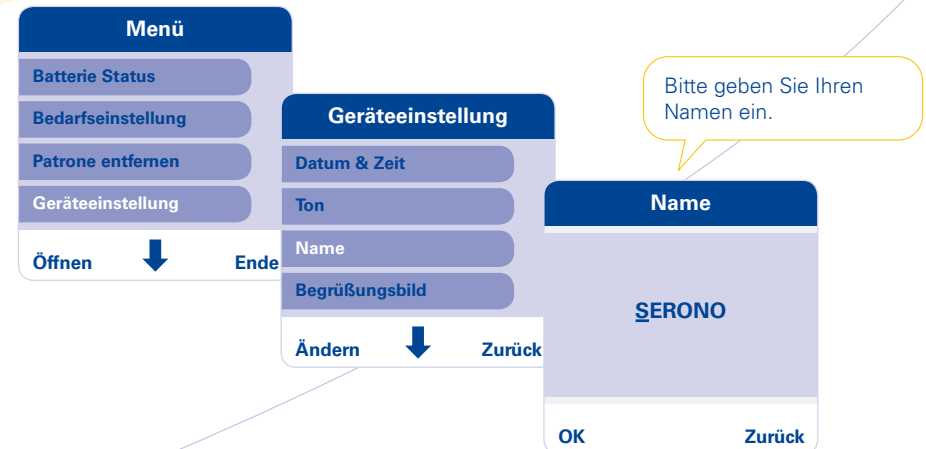

Begrüßungsbild

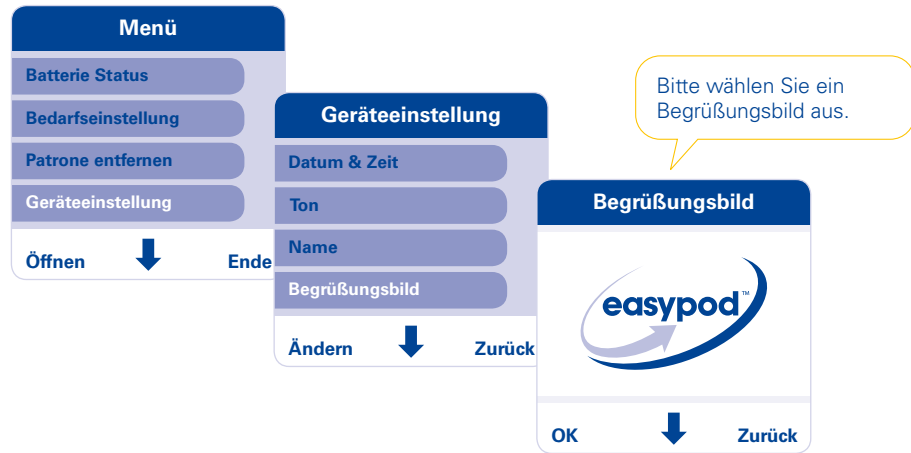

Hilfe

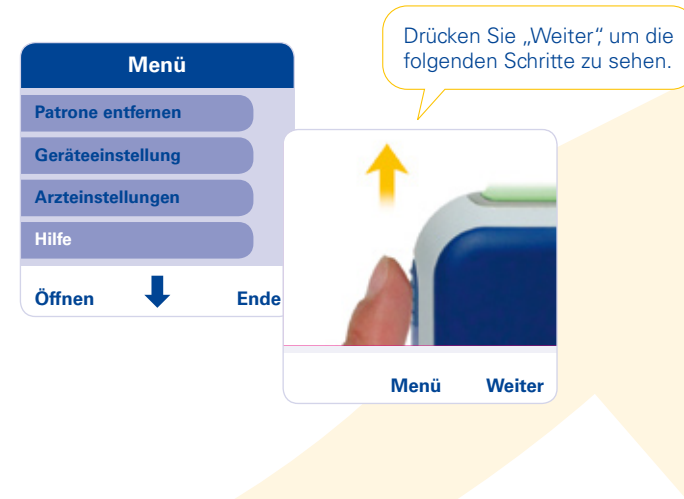

Sprache ändern

